



STK SKIN, DETECTER LES TRACES DE SPERME DIRECTEMENT SUR LA PEAU ET LES CHEVEUX

STK Skin a été spécifiquement développé pour les médecins légistes et les infirmières médico-légales afin de les aider à localiser les traces de sperme sur la peau et les cheveux des victimes. À la suite d'un viol, l'objectif de l'examen médico-légal de la victime est également de faciliter l'enquête en recueillant le sperme de l'agresseur. En raison de la faiblesse des solutions disponibles pour localiser les traces de sperme, le protocole actuel repose principalement sur un écouvillonnage à l'aveugle, dans l'espoir de recueillir le sperme de l'agresseur.

Pour faire face à ce problème, AXO Science a mis au point **STK Skin**, une **solution à vaporiser qui permet de détecter spécifiquement le sperme sur la peau et les cheveux de la victime. Non toxique, fiable et spécifique**, STK Skin multiplier vos chances d'obtenir l'ADN du violeur plus rapidement et plus efficacement.



STK Skin offre de nombreux avantages aux médecins légistes et aux infirmières médico-légales


- **Sensibilité** : même les traces mélangées, essuyées et rincées apparaissent
- **Spécificité** : seules les taches de sperme sont visibles
- **Non toxique** : sans danger pour l'utilisateur, la victime et l'environnement
- **Ne modifie pas l'ADN**, est entièrement compatible avec les techniques d'extraction et d'analyse de l'ADN
- Solution **pratique** et **portable**
- **Facile** et **prêt à l'emploi** : diluer 1 sachet de STK dans de l'eau déminéralisée
- Normes **ISO 18385** qualité médico-légale et **ISO 13485**
- Boîte de **sachets individuels scellés**

PROTOCOLE STK SKIN



1

Diluer 1 sachet de STK Skin dans 100 ml d'eau déminéralisée

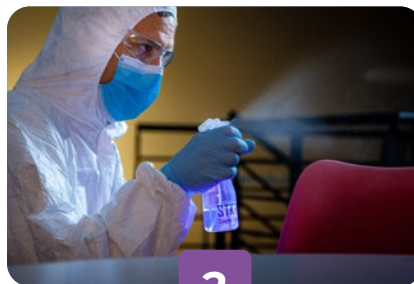

2

Vaporiser le corps de la victime à une distance d'environ 20 cm



3

Lire les résultats avec une lampe UV de 365 nm avec un filtre lumière visible : seules les taches de sperme brillent d'une couleur bleue



STK SKIN

- Peut être utilisé sur le corps et les cheveux de la victime
- 100% des taches de sperme sont détectées
- Pas de faux positif et surtout pas de faux négatif

AXO-STK-SK-10 : STK Skin - Boîte de 10 sachets

VAPORISATEUR

- Bruine fine
- Parfait pour vaporiser la solution STK Skin

AXO-STK-PV1

CONTRÔLE POSITIF

- Boîte de 10 contrôles positifs
- Parfait pour valider votre solution STK Skin

AXO-STK-PC-10



KIT DE DÉMARRAGE STK SKIN

- STK Skin : boîte de 10 sachets
- PC10 : boîte de 10 contrôles positifs
- Lampe UV rechargeable 365 nm
- Vaporisateur
- Lunettes UV (transparentes)
- Mallette

AXO-STK-SKIN-STARTER(EU) : Prise UE (E/F) pour la lampe UV

AXO-STK-SKIN-STARTER(US) : Prise américaine pour la lampe UV

LAMPE UV 365 NM RECHARGEABLE POUR STK SKIN

- Lampe UV 365 nm portable avec batterie pour STK Skin. Rechargeable, parfaite pour l'emporter sur le terrain



AXO-STK-L-UV-EU : Prise UE (E/F)

AXO-STK-L-UV-US : Prise américaine

AXO Science

AXO Science développe des solutions innovantes dans le domaine de la biologie moléculaire et de la médecine légale. Nous proposons désormais aux experts de la police scientifique la technologie STK Sperm Tracker, qui révolutionne la détection des traces de sperme sur les lieux du viol et en laboratoire. AXO Science est certifié ISO 13485 et ISO 18385.

Contactez-nous

sales@axoscience.com
www.sperm-tracker.com
Suivez-nous sur  

Utilisation réservée à la médecine légale

Copyright © 07/2024 AXO Science SAS. Document non contractuel. Tous droits réservés.

AXO Science, STK Sperm Tracker et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées d'AXO Science SAS. Fabriqué par AXO Science SAS. (Réf.) 24/07/AXOSTK/SKIN/PM/0001-FR